

Easy Test | Drugs

מבית ביומדיק טכנולוגיות רפואיות

ערכה משולבת לזיהוי 8 סוגי סמים

COC קוקאין/קריסטל | THC מריחואנה | BZO בנזודיאזפינים |
MOR הרואין | EDDP מתדון | BUP סבוסק |
FTY פנטניל | OXY אוקסיקודון |

Multi-Panel 8 Test Drug Screen

לשימוש מקצועי. בדיקה ראשונית, יש לאשר תוצאות בבדיקת מעבדה.

אמצעי זהירות

1. ערכה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
2. הערכה הינה חד-פעמית ואינה מיועדת לשימוש חוזר.
3. אין להשתמש בערכה אשר פג תוקפה.
4. אין להשתמש בערכה אם ארזת האלומיניום (הכיס) קרועה או לא אטומה.
5. יש להרחיק מילדים.
6. אין לקרוא תוצאות לאחר 5 דקות.

תכולה

1. בכל קופסא ישנם 25 בדיקות.
2. כל ארזת אלומיניום (כיס) מכילה בדיקה, טפטפת וחומר סופג לחות אחד. החומר סופג לחות מיועד לאחסון בלבד ואין להשתמש בו במהלך הבדיקה.
3. דף הוראות שימוש.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את הערכות באריזה סגורה עד לתאריך התפוגה.

יש להרחיק מקרני שמש, לחות וחום.

אחסון בטמפרטורה בין 30°C ~ 4°C

יש להרחיק מנוזלים ולחות

אין להשתמש בבדיקה פעם נוספת

איסוף דגימת השתן והכנה

אסוף דגימת שתן בכוס שתן.

ניתן לשים בקירור דגימת שתן (30°C ~ 4°C) ולאחסן עד 48 שעות.


לאחסון ארוך יותר יש להקפיא את דגימת השתן (20°C- או פחות).

יש להניח לדגימת השתן להגיע לטמפרטורת החדר לפני הבדיקה.

אופן הבדיקה

דגימת השתן והערכה חייבות להיות בטמפרטורת החדר. 10°C (~30 °C)

1. נא לא לפתוח את ארזת הבדיקה עד לרגע שבו אתם מוכנים לבצע את הבדיקה.
2. החזק צד אחד של הפנל וביד השנייה משוך את המכסה מצדו השני של הפנל וחשוף את מקלוני הבדיקה.
3. טבול את מקלוני הבדיקה בשתן למשך 10 שניות. **חשוב:** להקפיד שהשתן ייספג במקלוני הבדיקה בלבד ולא יעבור את הקו המסומן, כדי למנוע הצפה.
4. הנח את הפנל באופן מאוזן על מתקן שטוח, נקי ויבש.
5. קרא את התוצאות לאחר 5 דקות. אין להתייחס לתוצאה לאחר 5 דקות.

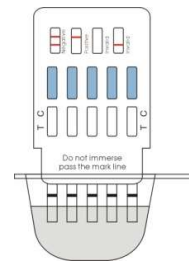


פירוש התוצאות

חיובי (+) קו אחד. (נמצא סם)

אם מופיע קו C ולא מופיע קו T התוצאה היא חיובית.

אם מופיע קו C ולא מופיע קו T התוצאה היא חיובית לגבי אותו סם שנבדק. יתכן ויותר מבדיקה אחת תהיה חיובית.

תוצאה חיובית אפשרית לבדיקה 2 ו-3.

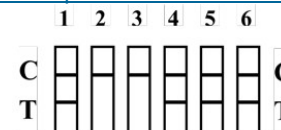


תוצאה שלילית (-) שני קווים (אין סם)

אם מופיע קו C וגם קו T התוצאה היא שלילית.

אם מופיע גם קו C וגם קו T התוצאה היא שלילית לגבי אותו סם נבדק. אם מופיעים גם C וגם T בכל הבדיקות התוצאה היא שלילית לכל הבדיקות.

תוצאה שלילית

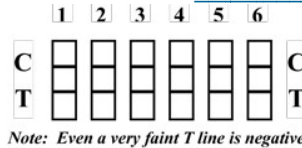

בדיקה או שתן לא תקין

אם לא מתפתח קו C הבדיקה אינה תקינה. יש לבצע בדיקה נוספת עם ערכה חדשה.

אם לא מתפתח קו C באף אחת מהבדיקות לאחר 4 דקות הבדיקה אינה תקינה אין להתייחס לתוצאה, יש לבצע בדיקה נוספת עם ערכה חדשה. **בדיקה לא תקינה 4 ו-5**



חשוב: יש לפענח כל תוצאה באופן נפרד. אין להשוות בין עצמת הקו של בדיקה אחת לשנייה. אין להשוות בין עצמת קו ה C לבין עצמת קו ה T